



CompoTech

Pasta diamantata con nanotecnologia per una lucidatura perfetta sui compositi

Istruzioni d'uso:

- 1° passaggio:

Usare **CompoTech** con spazzolini morbidi pelo capra usando una lieve pressione.

RPM  raccomandato 5.000/10.000.

- 2° passaggio:

Usare spazzolini morbidi in lana senza l'uso della pasta **CompoTech**, con una lieve pressione.

RPM  raccomandato 5.000/10.000

Per ottenere una lucidatura di altissimo livello, dopo avere passato **CompoTech**, si raccomanda di utilizzare la pasta diamantata **ShineTech gel** con una spazzola morbida di lana.

RPM  raccomandato 5.000/15.000